

Español

Applic

Restaurador Provisional Fotopolimerizable

Contenido:

02 jeringas con 2 gr.

Indicación:

APPLIC es indicado para ser utilizado en los procedimientos de restauración provisional y en el vedamiento temporal o definitivo de tornillo sobre implante.

Descripción del Producto:

El APPLIC es un material restaurador provisional fotopolimerizable y posee la función de sellar la cavidad de la pulpa dentaria, previniendo la microinfiltración y la salida de medicamentos intraconductos, asegurando un óptimo resultado del tratamiento endodóntico. Es un producto compuesto de resinas fotopolimerizables, de fácil aplicación y retirada, pues viene listo para el uso. No contienen eugenol, siendo compatible con las restauraciones de resinas compuestas.

Composición:

Grupos dimetacrilatos, catalizadores, carga orgánica, dióxido de silicio, fluoruro sódico, etanol, carbomer, BHT y óxido de hierro.

Modo de uso:

- COMO RESTAURADOR PROVISIONAL:

1. Para la aplicación del producto no hay necesidad de condicionamiento ácido ni el uso de adhesivo dentales;
2. Limpiar y secar la cavidad deseada;
3. Retirar una cantidad suficiente para vedar toda la cavidad en camada única y aplicar en el local;
4. Con la ayuda de un calcador, moldar el formato deseado;
5. Fotopolimerizar por 40 segundos;
6. Verificar la oclusión y si es necesario hacer el desgaste.

Retirada

- Con la ayuda de una cureta dental o sonda exploradora iniciar la retirada do APPLIC pelas extremidades cuidadosamente;
- Hacer el tratamiento definitivo;
- Desechar el empaste provisional retirado. Prohibida su reutilización.

- EN EL VEDAMIENTO TEMPORAL DE TORNILLO SOBRE IMPLANTE:

1. Aplicar una camada única sobre el tornillo;
2. Fotopolimerizar por 40 segundos;
3. Chequear la articulación con papel carbono.

Retirada:

- Con auxilio de una sonda exploradora remover el vedamiento temporal y desechar el material restaurador provisional utilizado;
- El tempo de permanencia del producto es de hasta 30 días. En casos de vedamiento temporal del tornillo sobre implante, hacer la substitución a cada 30 días.

- EN EL VEDAMIENTO DEFINITIVO DE TORNILLO SOBRE IMPLANTE:

1. Aplicar una fina camada, protegiendo el tornillo sobre implante;
2. Fotopolimerizar por 40 segundos;
3. Concluir la restauración definitiva, en casos de prótesis atornilladas o proceder a la cimentación de la pieza protética en casos de prótesis cimentadas.

Precauciones:

- Uso exclusivo del cirujano dentista;
- Desechar el empaste provisional tras el uso;
- No utilizar en pacientes con sensibilidad al producto;
- Mantener lejos del alcance de niños.

Condiciones de Almacenamiento y Transporte:

Almacenar la jeringuilla siempre cerrada después del uso y proteger el envase de la misma, de la luz solar.