

Español

ÁCIDOGEL

Condicionador Dental

Presentación:

3 jeringas con 2,5ml con 3 puntas.

Composición:

Ácido fosfórico, digluconato de clorhexidina, espesante, agua purificada y colorante.

Modo de usar:

- 1 – Limpie y seque la región a ser condicionada;
- 2 – Aplique el Ácido Gel Maquira y aguarde 15 segundos para dentina y 30 segundos para esmalte, o aguarde el tiempo determinado por el fabricante del agente adhesivo o de otro producto a ser aplicado después del proceso de condicionamiento;
- 3 – Limpie el local con agua en abundancia;
- 4 – Seque la dentina con algodón o papel absorbente y el esmalte con chorro de aire.

Precauciones:

Por tratarse de un producto compuesto de ácido fosfórico, el mismo no debe entrar en contacto con los ojos, piel y se debe tomar gran cuidado para no entrar en contacto con tejidos bucales. En caso de contacto accidental, lavar el área afectada en agua abundante. En la persistencia de irritaciones, buscar orientación médica.

Informaciones:

Advertimos que en casos como la mala higienización del área, grado variable de fluorosis, falta de aislamiento del cuadro, amelogénesis imperfecta, secamiento inapropiado del área o aceite en el aire del equipamiento de secamiento, puede ocurrir fracaso total o parcial del condicionamiento.

Almacenamiento:

Mantener en local seco, fresco y protegido de la luz.