



► 1. INTRODUCCIÓN

Estamos satisfechos con su elección y confianza por adquirir los productos de ESSENCE DENTAL. Nuestros equipamientos marcan un nuevo concepto en la funcionalidad, rendimiento y la ergonomía.

► 2. APLICACIONES


Se utiliza para eliminar las burbujas de aire con efectos de vibración en el recubrimiento, y moldeo de materiales de yeso.

Puede ser utilizado en los consultorios dentales, consultorios médicos, laboratorios de prótesis, clínicas, hospitales.

► 3. CARACTERÍSTICAS DEL MODELO:

- Hecho de material ABS, fácil limpieza, no se adhiere el yeso
- Ventosas de goma para mantener la unidad en el lugar de trabajo.
- Dos niveles potencia con intensidad diferentes
- Potenciómetro para controlar la velocidad
- Bandeja de goma extraíble para facilitar la limpieza después del trabajo.

► 4. COMPONENTES:

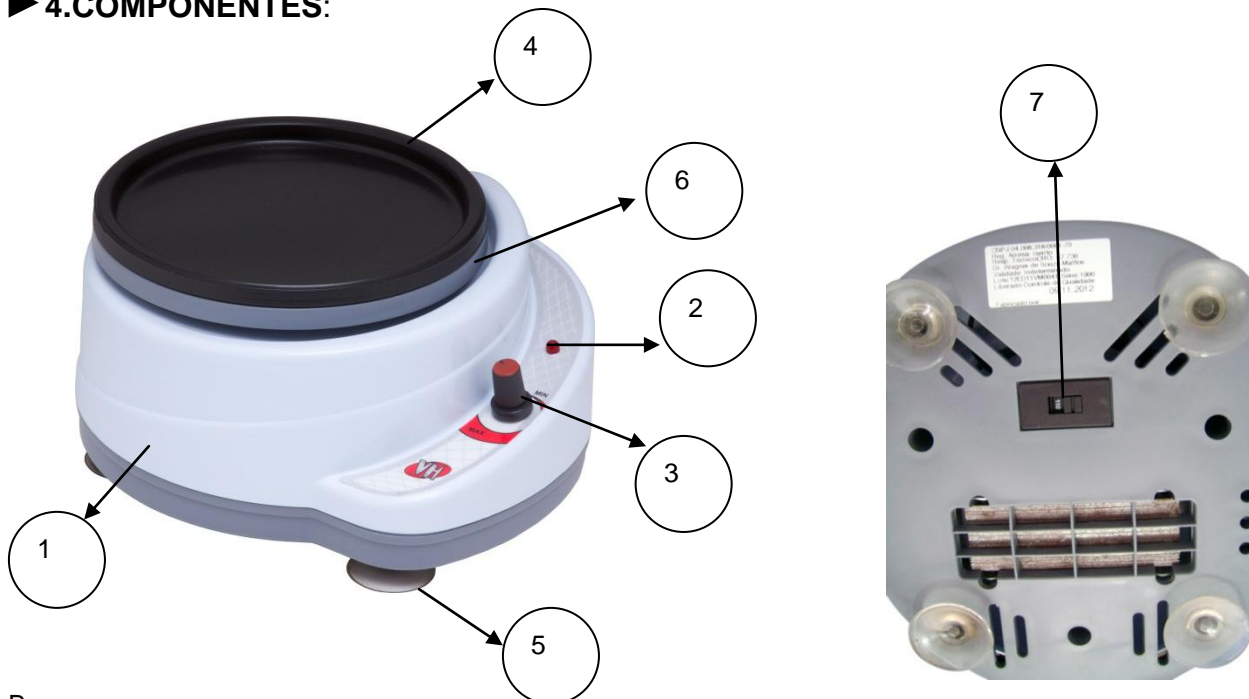

1. Base
2. Luz indicadora de encendido
3. Potenciómetro
4. Bandeja de goma
5. Ventosa de fijación
6. Base de la bandeja de goma
7. llave de recambio 110/220V

Todas las partes, accesorios o materiales que se utilizan son de uso exclusivo de los equipos, el uso de piezas, accesorios o material no especificado es responsabilidad del usuario.

► 5. INSTALACIÓN:

Elija una base plana para instalar el equipo para tener el ángulo correcto de operar.

El equipo debe colocarse a una distancia mínima (40 cm) para el calor y la humedad.

El equipo sale de la fábrica configurado para funcionar, en 220v, por lo tanto equipo, verifique la voltaje de la red eléctrica antes de enchufar, si usted necesita cambiar a 110v utilice la tecla selectora.

► 6 .INSTRUCCIONES DE USO:

1º: Preparar el yeso, según las instrucciones del fabricante.

2º: Gire el potenciómetro a el nivel la vibración seleccionada que se utilizará para el trabajo.

3º: Colocar el modelo, el anillo, en la bandeja de goma y llene gradualmente con el yeso.

► 7. ADVERTENCIAS



- Mantener fuera del alcance de niños o personas que no tienen la habilidad para el manejo adecuado
- Mantenga el equipo lejano de inflamables.
- Mantenga el equipo por lo menos 40 cm de las fuentes de calor.
- Mantenga el equipo fuera del alcance de la luz solar directa.
- Apagar la llave de la red eléctrica cuando no se utilice.
- No introduzca ningún objeto en cualquier parte del equipo.
- No trate de mover el equipo sujetándolo por el cable de alimentación.
- Jamás deje el cable de alimentación en contacto con las superficies calientes.
- Mantener fuera del alcance de niños o personas que no tienen la habilidad para el manejo adecuado.

► 8 .MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

Para limpiar el exterior utilizar una solución de agua y jabón neutro , y aplicar con paño húmedo.

La bandeja de goma se puede lavar , pero que antes de reemplazar comprobar si no está mojado.

Jamás sumerja el equipo en agua o cualquier líquido o colocarlo bajo el grifo.

► 9 .PROBLEMAS Y SOLUCIONES:

PROBLEMA	CAUSA PROVABLE	SOLUCIÓN
No hay vibración	Falta de la energía eléctrica	Asegúrese que hay corriente eléctrica
	Equipo apagado	Asegúrese que el botón está prendido y la lámpara indicadora encendida
Mala o poca vibración	Potenciómetro	Asegúrese que está utilizando el nivel adecuado para su trabajo
Vibración demasiada	Tensión eléctrica	Comprobar la voltaje local con la voltaje del equipo
	Potenciómetro	Asegúrese que está utilizando el nivel adecuado para su trabajo

▶ 10. CONTENIDO DEL EMBALAJE:

- 1- 01 Vibrador de Yeso - Vibramaxx
- 2- 01 manual del usuario

▶ 11. PIEZAS DE RECAMBIO:



El fabricante vende todas las piezas de repuesto extraíbles, discriminadas en este manual mediante una solicitud del distribuidor en su país, o por venta directa, si no hay un distribuidor autorizado.

▶ 12. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Modelo: VIBRAMAXX

ITEM # : 002 116

Peso neto: 1,280 kg

Peso bruto: 1,376 kg

Voltaje: 110V 220V / - llave del interruptor

Frecuencia: 50 / 60Hz

Potencia: 40W

Dimensiones: 180 mm (tamaño), 140 mm (altura) y 160 mm (Ancho).

▶ 13. TÉRMINOS DE LA GARANTÍA:

Si este equipo tiene cualquier defecto de fabricación, la fábrica cubre el costo de repuestos y servicios de sustitución de trabajo por un período de doce (12) meses. A partir de los tres (3) meses de la garantía legal y nueve (9) meses de garantía especial otorgado por, ESENCIA DENTAL desde la fecha de compra.

Si el equipo de reemplazo o piezas están hechas durante el período de garantía, esa no será extendida. la fecha de inicio de validez se mantiene informado en la factura.

NO VÁLIDO si:

- Los documentos son manipulados, alterados o ilegible en cualquier forma.
- El número de serie del equipo ha sido alterado, borrado, retirado o hecho ilegible.
- Defectos o reparación de los daños recurrentes a continuación: desmontaje, instalación, alteración o modificación de cualquier tipo, a personas o asistencia técnica no autorizado de la fábrica.
- Cuando la construcción de las especificaciones y recomendaciones del sistema a las condiciones descritas en este manual, la nivelación de los equipos, la idoneidad del sitio para la instalación, la tensión en las condiciones compatibles hidráulicos y neumáticos se observan.
- Los defectos o daños causados por caídas, accidentes, mal uso, negligencia, la descarga en la red eléctrica, relámpagos, agua o fuego.
- Los arañazos, grietas, grietas u otros daños en el equipo debido a la utilización diversa especificado en el manual.

No artículos de la garantía son:

- Los accesorios o componentes sujetos a desgaste durante el uso de equipos tales como la iluminación, desintegrándose recarga el filtro de escape, guantes, electrodos, cinta, cuchilla de corte, interruptores eléctricos generales, fusibles, cuchilla de corte, entre otros, no se caracteriza por defectos de fabricación, independientemente de la periodo de garantía.

Para evitar cualquier inconveniente, por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones en este manual antes de contactar.

Si su equipo no funcione correctamente o tiene alguna pregunta o sugerencia, por favor póngase en contacto con el distribuidor en su país en posesión de este manual, tarjeta de garantía, FACTURA / RECIBO DE COMPRA.



Fabricante: CNPJ: 04.008.318 / 0001-70 – ESSENCE DENTAL IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA.

Hecho en BRASIL

SAC: 55-16-3334-2000 ext. 301/302 Email: sac@essencedental.com.br